


HEATING PAD


熱敷墊使用說明書

FH96-1

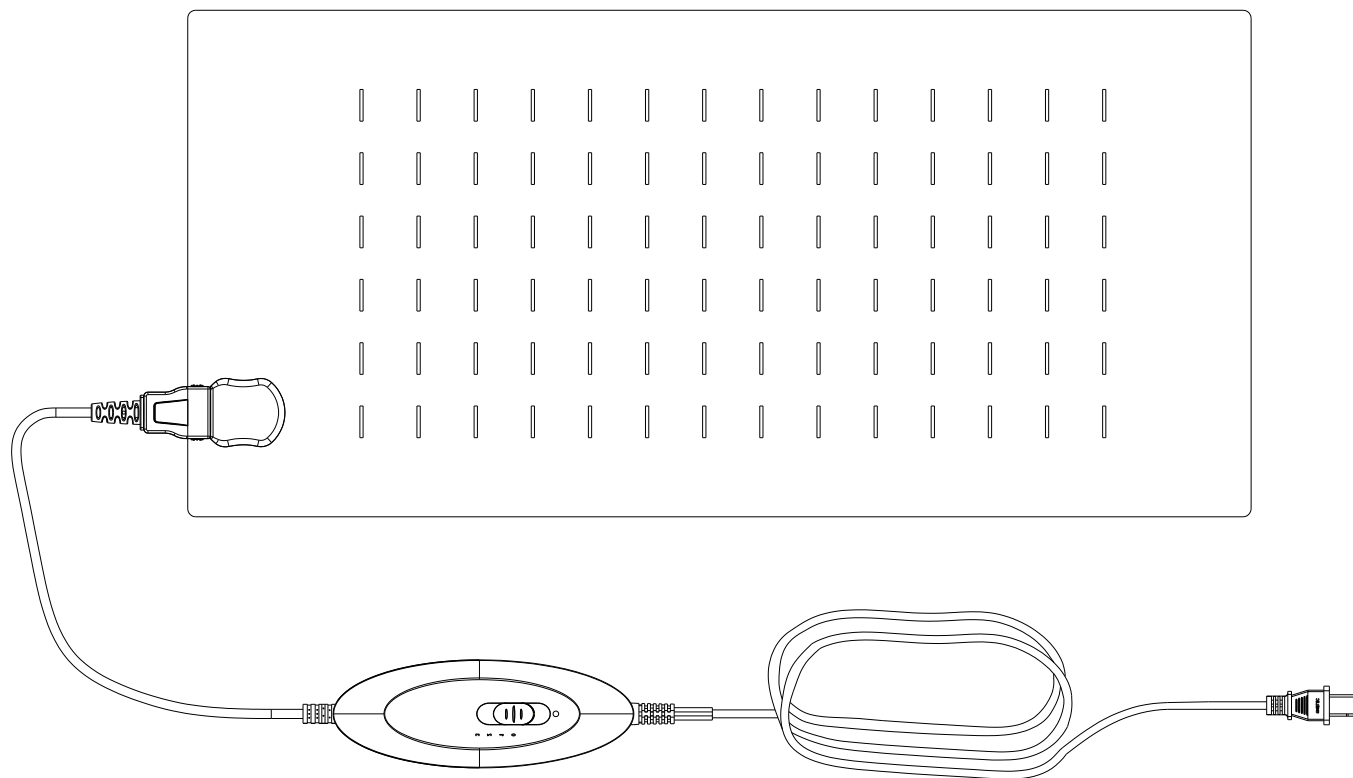

BIDDEFORD

產品介紹：

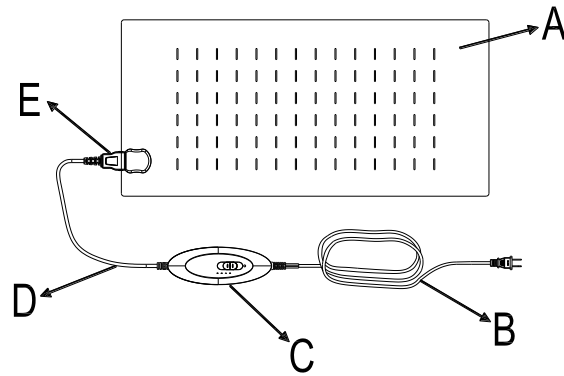


- A: 加熱墊
- B: 電源線
- C: 控制器（具調節式溫控開關及指示燈）
- D: 連接線
- E: 連接器

1. 使用前請仔細閱讀說明書。
2. 避免不慎觸電，使用本產品時請嚴格遵守以下事項：
 - a) 請避免控制器、開關或插頭受潮或弄濕。
 - b) 僅限於乾燥之環境下使用，避免在浴室等潮濕處使用。
 - c) 每次使用前檢查產品有無損壞狀況，如發現控制器、開關、插頭或熱敷墊有任何損壞，請勿再使用。
 - d) 禁止以針狀物或其他銳利物件刺入損壞產品。
3. 防止過熱使用，請嚴格遵守以下事項：
 - a) 無人使用狀況下，禁止開啟開關；離開房間時務必關閉電源。
 - b) 勿折疊使用。
 - c) 熱敷墊避免產生摺痕等情況。
 - d) 使用時，切勿以物品覆蓋控制器。為確保控制器功能正常運作，勿將控制器置放於熱敷墊之下，也不能壓在枕頭、床墊、被褥或衣物等物品下面。
 - e) 勿將電線纏繞在控制器上。
4. 避免使用於嬰幼兒、行動不便或對溫度變化反應遲鈍等人身上。
5. 在高溫狀態下過度使用可能導致皮膚灼傷。
6. 當熱敷墊加熱運作時，使用者不可睡著。
7. 嚴禁嬰兒使用本產品，亦不可讓幼童玩弄此熱敷墊。
嚴禁兒童接觸使用此產品，因為兒童無法察覺可能之危險性。
8. 經常檢查產品有無損壞，如有此類情況發生，或是產品未按正確方式使用，應停止使用，並洽詢製造廠商或授權經銷商。
9. 如電源線破損，必須找原廠、維修代理商或具同等專業資格之人員維修更換，以避免任何可能發生之危險。
10. 禁止自行拆卸和維修本產品，本產品需使用特殊專用工具進行組裝。
11. 當產品不需使用時，請將其平放於乾燥處，勿放置任何物品於熱敷墊上面，亦不可將熱敷墊摺疊存放，以避免產品損壞。

使用說明：

1. 將連接頭插好，以保證控制器與加熱墊之間是連通的。

連接器使用說明，將有卡勾端的連接頭插入另一端連接頭，如圖（A），如需斷開連接器，則需用手向裡擠壓卡勾，再將兩個連接頭分開，如圖（B）

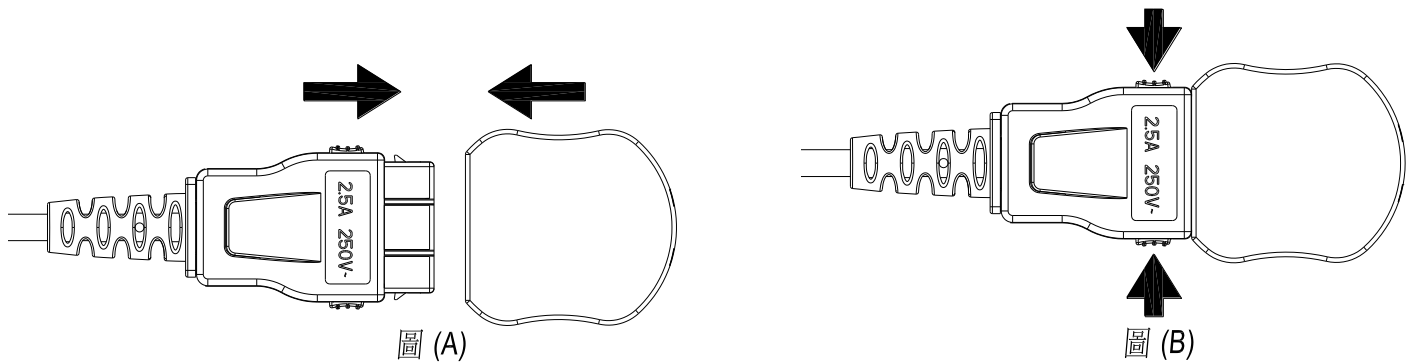

2. 將控制器插頭插在110 V至120V之插座上，調整溫控開關至最舒適溫度。

a) 調好最舒適之溫度段次後，熱敷墊即開始加熱運作，此時指示燈會亮起，表示產品已接通電源啟動中。

b) 將溫控開關調至“0”的位置，即可關閉熱敷墊，此時指示燈亦將熄滅。

注意：使用時須保持熱敷墊與接觸皮膚間之空氣流通。

3. 使用90分鐘後，控制器電源將自動停止加熱，但指示燈仍然亮著，若要重新加熱，請先將溫控開關調至“0”的位置（此時指示燈才會熄滅），然後再調至所需之溫度段次。

4. 使用後務必拔掉電源插頭。

BIDDEFORD 熱敷墊使用方式及應用如下：

請將熱敷墊覆蓋於身體部位（如手臂、肩膀、背部、腹部或側邊、小腿或大腿等部位），可使用綁帶固定。



洗滌說明：

注意：進行任何清洗動作之前，務必確定電源插頭已拔起，並將控制器與加熱墊分離。


1. 將加熱墊部分進行機洗或手洗。
2. 避免控制器潮濕，禁止使用任何清潔劑或溶劑，其可能損壞產品之設計結構。
3. 切勿將控制器置入水中，否則將導致控制器受潮損壞。

品質保證

本產品自售出日起算保固期2年。保固範圍包括控制器、電源線以及加熱墊。但以下不包括在保固範圍內：未正確使用產品、不按說明書指示使用或因非原廠修改設計而導致意外或損壞。

須出示經由經銷商填寫的保證卡，此保固服務方才生效。

標示說明:

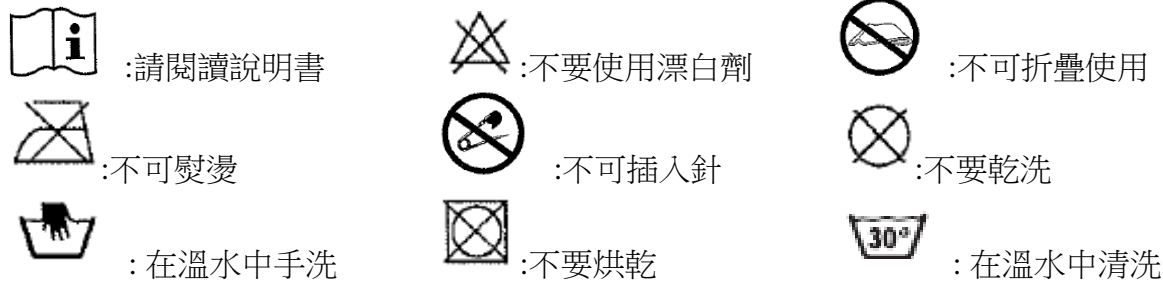

重要安全資訊

- 若電流熔線或溫度熔線斷路時,此電器必需送回製造廠或代理商維修。
- 請經常檢視產品是否有損壞之跡象,若有此跡象或有不當使用時,此產品必需返回供應商檢修。
- 若電源線損壞時,必須由製造廠或其授權委託服務處,由具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
- 本產品不適用醫院中作為醫療用。
- 避免將此產品弄皺。
- 本產品使用90分鐘後，控制器電源將自動停止加熱而關機。
- 儲存方式, 當產品不需使用時，請將其平放於乾燥處，勿放置任何物品於熱敷墊上面，亦不可將熱敷墊摺疊存放，以避免產品損壞。
- 禁止使用於嬰兒
- 禁止使用於癱瘓者及對溫度感覺遲鈍者例如:孕婦，糖尿病患等)
- 禁止使用於熟睡者或無意識患者。
- 請勿於易燃環境下，或鄰近充滿氧氣儲存設備旁使用。
- 請勿坐或壓在熱敷墊上。
- 請勿以強力壓折及扭曲方式使用或收納熱敷墊。
- 請勿以拉扯電線方式拔去插頭。
- 請勿以別針或其他金屬物品固定熱敷墊,以避免觸電。
- 本產品為可分離式控制器的電器用品，本體僅可使用標示相同型號的控制器一起使用。

| 產品名稱：熱敷墊 | | 型號：FH96-1 | | | | |
|---------------|------------|-----------|--------|----------------------------|---------------|-----------------|
| 單元 | 限用物質及其化學符號 | | | | | |
| | 鉛 (Pb) | 汞 (Hg) | 鎘 (Cd) | 六價鉻 (Cr ⁺⁶) | 多溴聯苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 塑膠外殼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電路板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 發熱線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電子元件 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 布料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 固定組件 (螺絲…) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

備考1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考2. “-” 係指該項限用物質為排除項目。其中貼片電阻，二極體及可控矽中鉛含量在RoHS中屬於豁免項。

代理商：源展實業有限公司 • 234新北市永和區中興街35號1樓
服務專線：02-89235947
製造廠名稱: Ongain Electronic (Shenzhen) Co., Ltd
製造廠地址: 16 Jiayi Industrial Area, Zhangqi Road,
Guanlan Street Longhua District, Shenzhen China