

MT 1PN1

IB MT1PN1 CH 4621

microlife
百略醫學

百略醫學電子體溫計 (MICROLIFE DIGITAL THERMOMETER)

型號：MT 1PN1 使用說明書

衛署醫器陸輸字第 000285 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用



感謝您購買此款電子體溫計。為了正確的使用本體溫計，建議您使用前認真閱讀本操作說明書，閱讀後，請妥善保管說明書以便後續再次參考。

產品描述：

- ① 開關 (O/I) 按鍵
- ② 顯示區
- ③ 電池蓋
- ④ 感溫頭

重要安全性說明：

- 此款電子體溫計適用於人體體溫測量。
- 最短測量時間是直到聽到嗶音，無一例外！
- 請確保小孩不能使用本體溫計在無人看管的情況下；本體溫計內含可能會被小孩吞食的細小物體，如電池等。如果本設備配有電線或管子，請注意窒息的危險。
- 請勿在靠近手機、微波爐、無線電等強磁場環境下使用產品。
- 請避免猛力摔落或敲擊體溫計以免造成不必要的損壞。
- 請避免彎折感溫端超過 45° ！
- 請避免在環境溫度高於 60°C 的條件下使用本體溫計，切勿水煮體溫計。
- 請依照說明書的“清洗和消毒”條款中列明的商用消毒劑來清洗本體溫計。
- 建議本產品每兩年進行精度測試或曾經發生撞擊（如：摔落狀況）。請聯繫經銷商安排測試。

開機：

請按下顯示幕旁邊的開關按鍵 ① 開機，這時會有一短的“Bi”聲，提示您已經開機。開機後會自動檢測然後顯示幕會全顯所有符號，接著顯示上次量測記憶值 2 秒及“M”符號。然後當環境溫度小於 32°C 時，顯示幕 ② 會顯示 «L» 並閃爍 «°C» 或 «°F» 此時即代表體溫計處於備用狀態，可進行體溫量測。

功能檢測：

本體溫計在每次開機時都會進行自檢以確保功能正常，如果檢測到功能異常（如操作不正確），顯示幕會顯示“ERR”，這時體溫計會無法測量。此時，請更換本體溫計。

使用本體溫計：

在體溫計量測時，顯示幕會一直顯示當前測量到的溫度值，在此期間“°C”符號會保持閃動。如果體溫計發出“嗶嗶”的聲音 5 次，同時“°C”停止閃動，這時可以讀取量測值了。當量測值超過 37.5°C 會發出 40 個“嗶”聲與紅色的螢幕背光，提醒量測者他 / 她已經發燒了。若是要對比量測的數據，請在每次測量之間需間隔 1 分鐘。

警告！ 為了延長電池的使用壽命，請在量測完成後按下開 / 關按鍵 ① 關閉體溫計。否則體溫計會在大約 3 分鐘後自動關機。

溫度單位轉換 °C / °F

當溫度計於關機狀態，請長壓開 / 關按鍵 ① 約 5 秒直到 «M» 符號消失於螢幕。此時請按開 / 關鍵切換溫度單位 °C / °F，約等待 3 秒後，當 °C 或是 °F 閃爍於螢幕時請按下開 / 關鍵確認。

量測方式：

▶ 口溫量測

將體溫計放入口腔，確保感溫頭 (4) 位於舌頭下靠左或靠

右的兩個空囊之一中，緊閉口腔並保持從鼻腔呼吸以避免吸入和呼出的氣體影響測溫。

量測時間：大約 10 秒

► 肛溫量測

這種模式是最精準的量測模式，而且特別適合嬰兒和小孩量測體溫，請小心的將感溫頭 (4) 插入被測者的肛門大約 2-3cm 即可進行量測。

量測時間：大約 10 秒

► 腋溫量測

為了得到更準確的量測結果，建議採用口溫或肛溫量測。如採用腋溫量測，則建議量測時間為 3-5 分鐘。

消毒與清洗

使用酒精棉片或軟綿布，並經過下面的消毒劑潤濕，然後對體溫計的外殼和感溫頭進行清洗和消毒。

名稱：水稀釋比例

異丙醇 70%：95.0%

注意：切勿使用腐蝕性的溶劑、稀釋劑或苯類溶劑進行清洗。而且請不要將體溫計浸入水中或其它清洗液體中。

更換電池：

當顯示幕的出現“▼”符號時，表示電池已經耗盡，需要更換新的電池。需要更換電池時，請打開背面電池蓋 (3)，取出舊電池，並放入將新的電池 (+ 正面朝上)，請確定電池規格和原來的一致。本電池可到電材行購買。如長時間不使用，請將電池取出以免外漏的電池液損害體溫計。

保固期限：

本產品提供 2 年保固。在保固期限內，如果發現有因為設計或製造缺陷引起的不良，我們將會給予無償維修或更換，但不包括電池及因不當使用所造成的任何損壞。保固需在保固期內提出視為有效。

請將功能不良的體溫計附帶購買的收據包裝好寄給您最近的經銷商。

技術規格：


產品種類	數位顯示電子體溫計
溫度量測範圍	32.0~43.9°C 當環溫低於 32.0°C， 顯示幕會顯示“L”（太低溫） 當環溫高於 43.9°C， 顯示幕會顯示“H”（太高溫）
量測準確度	±0.1°C 在 34°C -42.0°C，
操作條件	環境溫度 10°C ~40°C； 相對最大濕度範圍 15-95%
儲存條件	環境溫度 -25°C ~+55°C； 相對最大濕度範圍 15-95%
顯示幕	液晶顯示幕（背光）
儲存功能	自動儲存上一次的測溫讀值
電池種類	3V; CR1632 鈕扣型電池
IP 防護等級	IP34(防護 2.5mm 直徑和更大的固體外來體； 從所有可行的方向防止濺水和噴水)
參考標準	EN12470-3, IEC 60601-1, IEC 60601-1-2(EMC)

醫療器材商名稱：百略醫學科技股份有限公司

醫療器材商地址：台北市內湖區瑞光路 431 號 9 樓

製造業者名稱：ONBO Electronic (shenzhen)Co., Ltd.

製造業者地址：No.138, Huasheng Road, Langkou Community,
Dalang Street, Longhua District, Shenzhen,
China

 丟棄電池或本產品時需遵照當地的相關法規（不包括家居廢物）。



表示此產品為內部電源類 BF 型應用部份設備。



使用前請詳細閱讀本使用說明書。

總代理：泰豐生技股份有限公司

電話：(02)6635-8789

服務時間：上午 8:30~ 下午 5:30

地址：241 新北市三重區重新路五段 609 巷 10 號 4 樓

版本:4621